



(<http://www.facebook.com.br/caithec>)

(tel:(41) 3098-8998)

---

Mostrar Menu

[Página inicial \(/\)](#) / [Produtos \(/produtos\)](#) / [RAYTEC - REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO](#)

## RAYTEC - REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO

RAYTEC - REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO é utilizado para revelação da imagem do exame na película de filme, sendo um revelador radiográfico odontológico de pronto uso. Garante uma revelação mais rápida com maior durabilidade. O Revelador em conjunto com fixador possibilita que a imagem extraída do paciente seja transferida para película para que o exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Pronto para o uso.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO:** Frascos com 475 ml.

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

#### Armazenamento e Conservação:

Armazenar em temperatura ambiente, protegido da luz e calor.

Manter a embalagem hermeticamente fechada após o uso, em local limpo e seco.

Manter em local seco e ventilado.

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

#### Instruções de uso:

O Revelador em conjunto com o Fixador possibilita a transferência da imagem para película radiográfica.

O tempo de revelação e fixação pode variar de 1 a 5 minutos conforme temperatura ambiente.

Quanto mais frio, maior o tempo em que a película deve permanecer em contato com o Revelador para obtenção da imagem. O tempo de enxague indicado após a revelação deve ser de 0,5 minutos e o tempo de enxague indicado após usar o Revelador é de 1 minuto.

Os recipientes que contém as soluções reveladora e fixadora devem ser mantidos tampados quando não estiverem em uso, já que a composição química destes produtos oxida com o ar. A água utilizada na lavagem intermediária deve ser trocada diariamente.

Pronto para uso em pequenos recipientes, adequado à necessidade do usuário. Presta-se a revelação manual com controle visual à temperatura ambiente.

Atenção: O bom estado e a temperatura do revelador, a agitação, o tempo de exposição aos raios X e a sensibilidade do filme são fatores que determinam a velocidade da revelação e a conseqüente qualidade da imagem pretendida. Importante não compensar o desgaste das soluções com aumento de exposição aos raios X.

#### Precauções e Advertências:

Solução potencialmente irritante para o tecido mucoso e cutâneo. Poderá causar desconforto, irritações e/ou reações alérgicas. Lavar abundantemente as áreas atingidas com água. Se ingerido, procurar imediatamente auxílio médico.

Produto de uso exclusivamente profissional;

Manter fora do alcance de crianças;

Poderá manchar tecidos com fibras naturais;

Não reutilizar esta embalagem.

**VALIDADE:** 01 (um) ano após a data de fabricação aplicando os critérios de uso e armazenagem corretamente.

## Imagens



[Clique na imagem para ampliar](#)

[Página Inicial \(/\)](#)

[Empresa ▾](#)

[Publicações ▾](#)

[Produtos ▾](#)

[Trabalhe Conosco \(/vagas\)](#)

[Contato \(/contato\)](#)

