

EUGENOL



Descrição

Material Restaurador Provisório

EUGENOL é obtido através do Óleo de Cravo. É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. Tem cheiro de cravo.

Praticamente insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos.

Tem uma ação anódina (calmante) sobre a polpa, por isso é muito utilizado como curativo de espera para restaurações.

Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Instruções de Uso

Cimento de Óxido de Zinco - EUGENOL:

Colocar em uma placa de vidro lisa, no máximo 2 a 3 gotas de EUGENOL e ir acrescentando o Óxido de Zinco, espatulando até obter a consistência desejada

Apresentação

1 frasco com 20mL de EUGENOL.